



アラーム検知之助[®] 登録方法

アラーム検知之助

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

1 アプリダウンロード

ユーザー情報の登録

検知之助のサポートへの問合せや、契約更新やアプリ更新を受けるための連絡先を登録します。利用者ではなく管理者の情報を入力して下さい。

法人名(法人登録のみ) 残30文字

氏名 **必須** 残15文字

メールアドレス **必須** 残50文字

電話番号 残14文字

2 ユーザー情報登録



3 本体の設定ボタンを長押し → Wi-Fi設定よりアラーム検知之助を選択

検知之助の名称設定

現在設定中の検知之助の名称を設定します。

検知之助の名称を選択してください。選択肢にない場合は「その他」を選択して検知之助の名前を最大15文字で入力してください。

人工呼吸器

パルスオキシメーター

その他

設定が完了したら、「次へ」ボタンをタッチしてください。

4 名称設定

検知之助のアイコン設定

この検知之助をあらわすアイコンを設定します。

設定が完了したら「次へ」ボタンをタッチしてください。

次へ

5 アイコン設定

アラーム色の設定

アラーム発生時に発光するランプの色を設定します。

カラーセンサーに両面テープを付け、アラーム発生時に発光する部分に貼り付けてください。
*センサー背面のくぼみが感知エリアですので、その下に発光部が当たるようにしてください。

貼り付けたら「次へ」ボタンをタッチしてください。

既に測定されて変更しない場合は「変更しない」ボタンをタッチしてください。

アラーム色の設定 (判定方法)

アラーム色の判定方法を設定します。

「アラーム発生時のみ発色」が推奨ですが、カラーセンサーを取り付けている部分が、アラーム発生時のみLEDや液晶が発色するか、アラーム発生時に色が変わるかを以下の表を参考にしてください。

選択肢	発色パターンの例
アラーム発生時のみ発色	
アラーム発生時に色が変わる	

*「アラーム発生時に色が変わる」を選択した場合、カラーセンサーに日光が当たる状況は避けてください。

アラーム発生時のみ発色

アラーム発生時に色が変わる

アラーム色の設定 (正常時)

アラームが発生していない時(正常時)のランプの色を測定します。

アラームが発生していない(正常時)ことを確認してから、「測定」ボタンをタッチしてください。

測定

アラーム色の設定 (異常時)

アラーム発生時(異常時)のランプの色を測定します。

アラームを発生させてランプが異常を通知している状態であることを確認してから、「測定」ボタンをタッチしてください。

測定

アラーム色の設定 (確認)

アラームを停止してください。

測定したアラーム発生時(異常時)のランプの色を確認してください。

測定したアラーム色

測定した色が正しい場合は、「次へ」ボタンをタッチしてください。

測定した色が正しくない場合は「再測定」ボタンをタッチし、測定し直してください。

再測定

次へ

6 アラーム色設定(正常時と異常時の登録を行い、アラーム色が正常に測定出来ていれば次に進む)



7 使用するWiFiを選択。パスワードを入力。(2.4GHzのみ対応)



8 カメラ位置の調整。カメラボタンを押して画像を確認して、位置を調整する。



アラーム 検知之助[®] アプリ使い方

- ① ≡ アラーム履歴
- ② ≡ 検知之助一覧
- ③ ⚙️ 個別設定
- ④ ⚙️ オプション
- ⑤ ⚙️ 順次設定 →登録方法参照
- ⑥ ? ヘルプ

⑥ヘルプ

- ・お問い合わせ
- ・ユーザー情報
- ・検知之助情報
- ・ソフトウェアバージョン
- ・利用規約
- ・プライバシーポリシーを確認できます。

③個別設定
登録時の設定項目を個別に変更できます。



④オプション
6項目のオプション設定が出来ます。



①アラーム履歴


過去のアラームの確認が出来ます。(最大100件)

<アラーム通知の種類>

- ・アラーム発生通知
- ・通信切断通知
- ・カラーセンサー故障通知

<通知のON/OFF>

通知を受信する必要が無い時に通知受信をOFFにすることが出来ます。通知受信をしないのみで履歴には残ります。

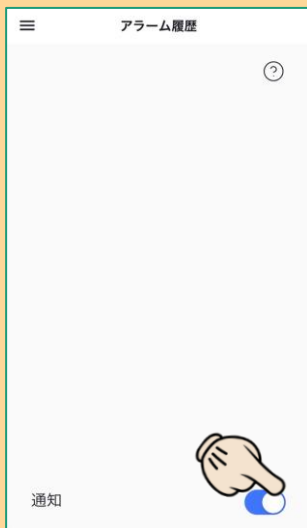

②検知之助一覧

登録している検知之助の確認が出来ます。
(端末1台に対して検知之助5機まで登録が可能)

LED点滅の意味

状態	点灯 LED	点滅パターン	時系列パターン
稼働中	青	3秒間に1回	
Wi-Fi アクセス ポイント探索中	青	ずっと点灯	
設定中	青	1.5秒に2回	
写真送信中	青・橙	ずっと点灯	
通信切断	橙	1.5秒に2回	
故障	橙	0.75秒毎に点滅	
本製品ソフトウ ェア更新中	橙	ずっと点灯	